

## 新規実施項目のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
このたび、新たに下記の検査項目が受託可能となりましたのでご案内いたします。  
ご利用いただきますよう、お願い申し上げます。

敬白

### 記



## ■実施日 平成29年 1月 5日(木) ご依頼分より

## ■新規実施項目

項目コード	検査項目	検査方法	基準範囲(単位)	検体量(mL)	容器	保存	所要日数	実施料	判断料
5976-58	百日咳菌DNA	LAMP法	陰性	後鼻腔ぬぐい液	k9 21	冷蔵	2~5	360	150 (微生物)

※後鼻腔ぬぐい液は、必ずフロックススワブ(k9)で採取し、滅菌スピッツ(21)にスワブを入れて冷蔵保存してください。他項目との重複依頼は避けて下さい。本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取扱いに充分ご注意ください。

### <専用容器取扱い方法>

容器形態		検査項目	保存		
容器記号 k9	容器記号 21	百日咳菌DNA	冷蔵		
採取方法					
 容器貯蔵方法 室温 有効期間 1年		 容器貯蔵方法 室温			
				1. 綿球部分に触れないように、スワブの軸部分をつまんで取り出します。	
				2. 被験者の頭を動かさないようによく押さえ、その後、スワブを後鼻腔に静かに挿入して粘液を採取します。	
				3. 速やかにスワブを滅菌スピッツ(21)の中に入れ、スワブの柄にあるスリットを容器の縁にあてて折ります。	
		4. スワブを入れたまま容器のキャップをしっかりと閉め、冷蔵保存にて提出してください。			