

## 百日咳菌DNA採取容器変更のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。  
このたび、百日咳菌DNAの採取容器を下記のとおり変更させていただきますので、ご案内いたします。

### 記

#### ■実施日 平成30年 8月中旬お届け分より順次変更

#### ■変更内容

案内書 掲載頁	項目 コード	検査項目	容器	
			現	新
66	5976-58	百日咳菌DNA	r	k9

#### ■変更容器


現	
名称	r ヲコレクトスワブ
容器 形態	



新	
名称	k9 百日咳菌DNAセット
容器 形態	

#### 採取後の提出方法

- 1 検体採取後、速やかにスワブを滅菌ポリスピッツの中に入れ、スワブの柄にあるスリットを滅菌ポリスピッツの中に入れ、容器の縁にあてて折ります。

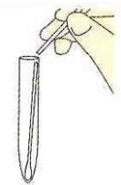

- 2 スワブを入れたまま容器のキャップをしっかりと閉め、提出してください。

