

## 新規実施項目のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
このたび、新たに下記の項目を受託開始しましたのでご案内いたします。  
ご利用いただきますよう、お願い申し上げます。

### 記

#### ■実施日 令和元年 5月 28日（火）ご依頼分より

#### ■新規実施項目

項目コード	検査項目	検査方法	検体量 (mL)	容器	保存	所要日数	実施料判断料
6483-03	男性AIRS(8種)	LC/MS	血液 5.0	C	裏面参照	9~13	-
1776-03	女性AIRS(9種)						

\* 従来の項目に、脳心疾患リスクが追加されました。詳細については裏面をご覧ください。

#### ■受託中止項目

案内書掲載頁	項目コード	検査項目	受託中止日
89	1803-03	AIRS<男性>	令和元年5月27(月) 依頼分をもって受託中止
	1804-03	AIRS<女性>	

## ■受託における注意点

AIRS®は下記年齢の日本人（妊娠されている方を除く）を対象として開発された検査です。これらの方以外は評価対象外となります。

検査項目		評価対象	対象年齢
男性 A I R S 8 種	AICS（5種）	胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん	25歳～90歳
		前立腺がん	40歳～90歳
	AILS（脳心疾患リスク）	10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク	30歳～74歳
	AILS（糖尿病リスク）	4年以内に糖尿病を発症するリスク	20歳～80歳
AILS（アミノ酸レベル）	血液中の必須・準必須アミノ酸の低さ		
女性 A I R S 9 種	AICS（6種）	胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん	25歳～90歳
		子宮がん・卵巣がん	20歳～80歳
	AILS（脳心疾患リスク）	10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク	30歳～74歳
	AILS（糖尿病リスク）	4年以内に糖尿病を発症するリスク	20歳～80歳
AILS（アミノ酸レベル）	血液中の必須・準必須アミノ酸の低さ		

※ 脳卒中・心筋梗塞の方（治療中も含む）の AILS（脳心疾患リスク）値、糖尿病の方（治療中も含む）の AILS（糖尿病リスク）値や検査結果に基づくタイプは評価対象外となります。

## ■ ご依頼時の注意点

\* 予約検査となっております。キューブクーラーをお届けしますので、採血日の2日前までにご連絡をお願いします。

\* 受診者には、採血前8時間は、絶飲食（水は可）でお越しいただき、午前中に採血して下さい。

\* 採血後は、直ちに採取管をキューブクーラーに入れ冷蔵保存してください。

※キューブクーラーは、 $-20^{\circ}\text{C}$ で10時間以上、予備冷却が必要です。

※キューブクーラーは、予備冷却後はすぐには使用できません。（下記 使用方法参照）

\* ご依頼の際は、依頼書 I の通信欄に項目名を記入願います。

\* 解析に必要ですので、必ず性別・年齢を記入願います。

## ■キューブクーラーの使用方法

キューブクーラー（CUBE-T20型）は採血管冷却保冷容器です。

手順①（予備冷却）



当検査センターよりキューブクーラーが届きましたら、スチールのBOX（赤丸）部分を取り出し、冷凍庫（ $-20^{\circ}\text{C}$ ）で10時間以上蓄冷してください。

手順②（使用時）



(1) 採血30分前に冷凍庫からスチールBOXを取り出してください。

(2) 30分後に温度計シールが適温（使用可能）となっているかをご確認ください。

手順③（採血後～提出）



適温になっているスチールBOXに青色のカバーをして採血した検体を挿入して下さい。冷凍庫から取り出したスチールBOXは、8～10時間氷冷温度を維持します。