

新規実施項目のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、クラミジアトラコマチス・淋菌遺伝子検査(TRC法)を所内導入致しますので、ご案内いたします。

TRC法は、PCR法と同等な検出感度の遺伝子検査法です。変更点は①報告日数が2日程早い②容器変更(裏面参照)です。また、依頼方法は変更ありません。

記

■実施日 令和2年1月20日(月)ご依頼分より

■新規実施項目

*項目コード	検査項目	検査方法	基準範囲(単位)	検査材料・検体量(mL)	容器	保存	所要日数	実施料	判断料	
3063-22	クラミジア	TRC法	陰性	子宮頸管分泌物	F3	冷蔵	1~2	204	150 (微生物)	
3063-54	トラコマチス核酸			男性:初尿0.5mL	Y1					
3063-99	(rRNA)同定			うがい液:0.5mL						
3802-22	淋菌核酸			子宮頸管分泌物	F3					
3802-54	(rRNA)同定			男性:初尿0.5mL	Y1					
3802-99				うがい液:0.5mL						
6017-22	淋菌及びクラミジア			子宮頸管分泌物	F3			Y1		286
6017-54	トラコマチス核酸			男性:初尿0.5mL						
6017-99	(rRNA)同時同定			うがい液:0.5mL						

*項目コードは下記の中止項目と変更ありません。

検体は、採取当日または翌日中にご提出ください。



■受託中止項目

今回の新規受託開始に伴い、下記項目は令和2年1月18日(土)依頼分をもって受託中止とさせていただきます。

総合検査案内ページ	検査項目	検査方法
72	クラミジアトラコマチスDNA	PCR(リアルタイムPCR)
	淋菌DNA	PCR(リアルタイムPCR)
	淋菌及びクラミジアトラコマチスDNA同時同定	PCR(リアルタイムPCR)
	淋菌及びクラミジアトラコマチスrRNA同時同定	TMA


容器については裏面をご覧ください。

■容器について


名称	F3 淋菌・クラミジア核酸(rRNA)同定 分泌物用	Y1 淋菌・クラミジア核酸(rRNA)同定 尿・うがい液用
セット内容	説明書 クリーニング用綿棒 採取用綿棒	説明書 スポイド 専用容器 スピッツ
容器形態		

■依頼方法について

今まで通りのチェックをお願いします。

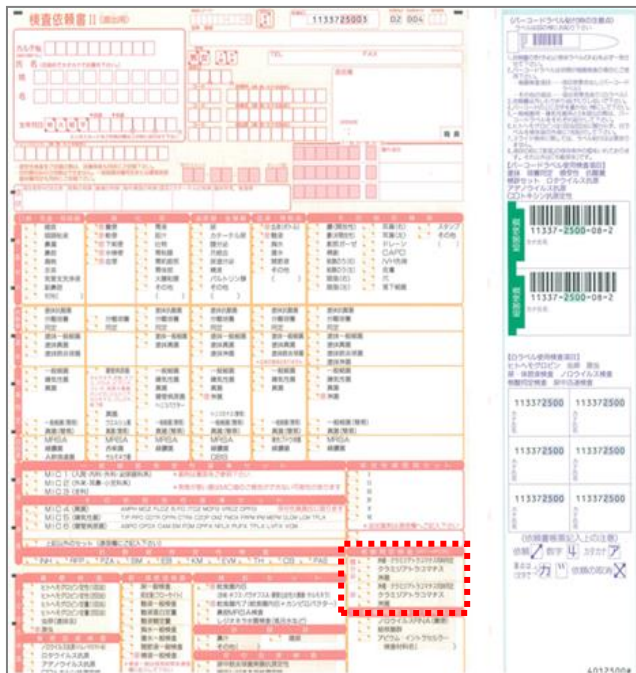

The image shows a detailed laboratory request form. A red dashed box highlights the 'Y1' section, which corresponds to the '尿・うがい液用' (urine/urine wash) kit. The form includes various fields for patient information, test requests, and laboratory codes.

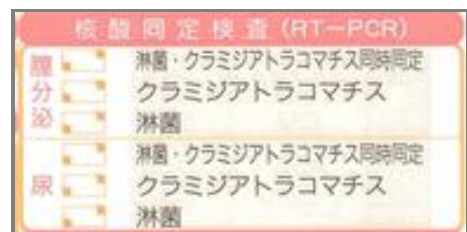核酸同定検査 (RT-PCR)

分泌物	淋菌・クラミジアトラコマチス同時同定 クラミジアトラコマチス
尿	淋菌・クラミジアトラコマチス同時同定 クラミジアトラコマチス