

コールセンター Q&A

Q136


採血管への正しいラベルの貼り方を教えてください。

A136

長い採血管、短い採血管、どちらも採血管の蓋から 1 cm離れた位置を目安に 真っすぐ貼っていただくことをお願いしています。

《 血糖採血管を測定用ラックに差した状態 》

- ①正しい検体ラベルの位置
- ②検体ラベルが下すぎるためバーコードがラックに隠れて読み取れない
- ③検体ラベルが斜めになってバーコードが読み取れない

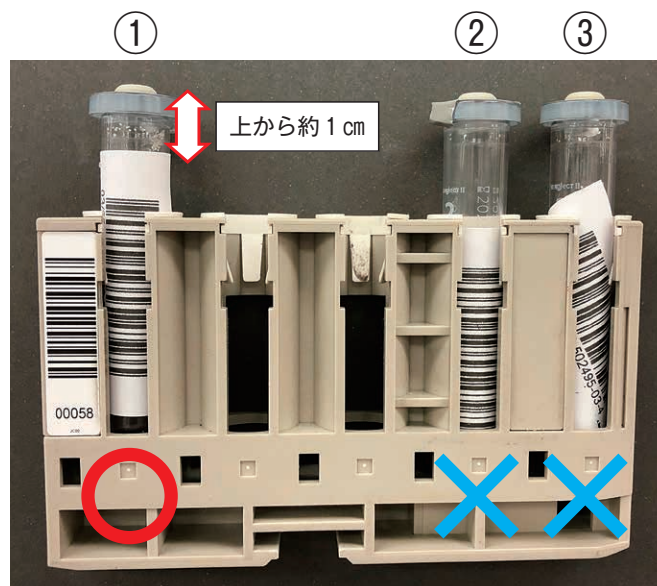

検体ラベルが斜めだと、機器が読み取ることができず、エラーとなるため、ラベルを再発行・貼り直しを行っており、至急報告の報告遅延の一因になります。迅速な検査を行うためにご協力をお願いいたします。

担当 検査科 生化・免疫係

<広報委員> 石田 啓 / 石田 有里 / 新見 唯可

*ウェブサイトでもご覧いただけます。 <http://www.labo.city.hiroshima.med.or.jp/>