

コールセンター Q&A

Q137

先天性代謝異常等検査および新規疾患スクリーニング検査のために採血をする際、ヘマトクリット管を使用してもよいでしょうか？

A137

ヘマトクリット管に含まれる添加剤（ヘパリン）が検査結果に影響する可能性がありますので使用しないでください。先天性代謝異常等検査および新規疾患スクリーニング検査の採血をする際は、ランセットなどを用いてかかとから直接濾紙へ採血してください。特に新規疾患スクリーニング検査で行う定量 PCR ではヘパリンにより PCR 反応が阻害されるため、偽陽性となる可能性があります。



かかとから採血する様子



ヘマトクリット管は使用不可

担当 検査科 生化・免疫係

<広報委員> 石田 啓 / 石田 有里 / 新見 唯可

*ウェブサイトでもご覧いただけます。 <http://www.labo.city.hiroshima.med.or.jp/>